

[中文]  
鸟类样本采集指南

鸟类血液样本采集

**注意:**


如果您没有处理鸟类的经验，我们建议由经验丰富的人或兽医采集样本。这项预防措施是为了鸟类和您自己的安全。

**材料准备**

- i) 指甲钳
  - ✓ 请用消毒酒精棉清洗指甲钳
  - ✓ 在为下一只鸟采集样本之前，请洗手
- ii) 凝血剂 (如：爽身粉，淀粉或其他适合鸟类用的的凝血剂)
  - ✓ 取血后用来止血
- iii) 消毒酒精棉 (alcohol swab)
  - ✓ 用来清理指甲钳和鸟的脚趾甲
- iv) 线上提交 (只限马来西亚顾客)、血液样本采集表格 (国外顾客)
- v) 信封 (envelope) / 自封袋 (ziplock bag)
  - ✓ 每一个信封/ 自封袋仅用于装一只鸟的样本

**血液样本采集程序**

1. 在线上提交，或者采集表格上填写详细资料后，并在信封/ 自封袋上标签：
  - a. 饲主姓名
  - b. 鸟类名字/ 脚环编号ID
  - c. 鸟类品种
2. 用消毒酒精棉清理鸟的脚趾甲。
3. 小心的将鸟抓紧后，按照右图，用指甲钳剪脚趾甲取血。
4. 剪了后，慢慢挤压脚趾甲直到流出一滴小血。
5. 在干的A4纸、血液样本采集表格上点 1 - 3 小滴血。
6. 让采集的血液在干净的环境里风干 1 小时。
7. 在把鸟儿放回笼子之前，您可以使用凝血剂止血，确保它不再流血。

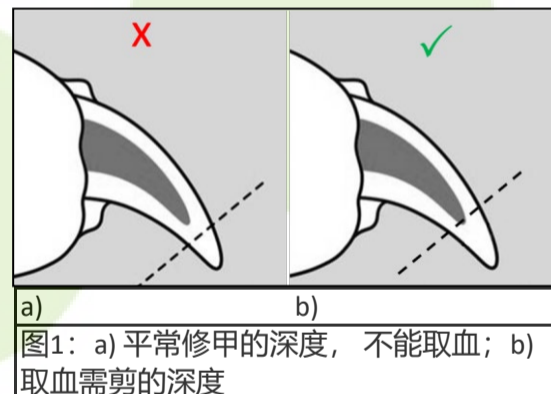

8. 将剪好沾有血迹的A4纸，或者血液样本采集表格，放入标签了的信封/ 自封袋中。

**注意:** 务必将不同鸟的血液样本放在各自标签好的信封/ 自封袋里。

9. 邮寄准备好的样本至以下地址。

**来自马来西亚或其他国家的顾客:-**

APICAL SCIENTIFIC SDN. BHD.

Lot 7-1 to 7-4, Jalan SP 2/7,

Taman Serdang Perdana, Seksyen 2,

43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

**注: Avian PCR Test**

**来自新加坡的顾客:-**

AXIL SCIENTIFIC PTE. LTD.

41 Science Park Road, #04-08 The Gemini,

Singapore Science Park II,

117610 Singapore

**注: Avian PCR Test**