

[中文]

鸟类样本采集指南

鸟类羽毛样本采集

注意:

如果您没有处理鸟类的经验，我们建议由经验丰富的人或兽医采集样本。这项预防措施是为了鸟类和您自己的安全。

材料准备

- i) 镊子:
 - ✓ 请用消毒酒精棉清洗镊子
 - ✓ 在为下一只鸟采集样本之前，请洗手
- ii) 消毒酒精棉 (alcohol swab)
- iii) 线上提交 (仅限马来西亚顾客)、羽毛样本采集表格 (国外顾客)
- iv) 胶纸
- v) 信封 (envelope)/ 自封袋 (ziplock bag)
 - ✓ 每一个信封/ 自封袋仅用于装一只鸟的样本

羽毛样本采集程序

1. 在线上提交，或者采集表格上填写详细资料后，并在信封/ 自封袋上标签：
 - a. 饲主姓名
 - b. 鸟类名字/ 脚环编号ID
 - c. 鸟类品种
 2. 小心的将鸟抓紧后，按照以下的方法采集胸部羽毛：
 - a. 拿起干净的镊子；
 - b. 按照图2抓住羽毛底部/羽根 (靠近胸部的皮肤)；
 - c. 每次只拔一根羽毛，然后重复拔三根羽毛；
 - d. 拔出的羽毛底部/羽根末端应该有一个白色的毛囊。请保留羽根末端沾有的血肉，这血可用于DNA性别鉴定。
 3. 请按照以下的方法将样本寄出：
 - a. 请勿用手触碰羽毛样本的毛囊/羽根末端；
 - b. 把不同鸟只的羽毛放进各别标签好的信封/ 自封袋。
- 注意:** 务必将不同鸟的血液样本放在各自标签好的信封/ 自封袋里。
4. 邮寄准备好的样本至以下地址。

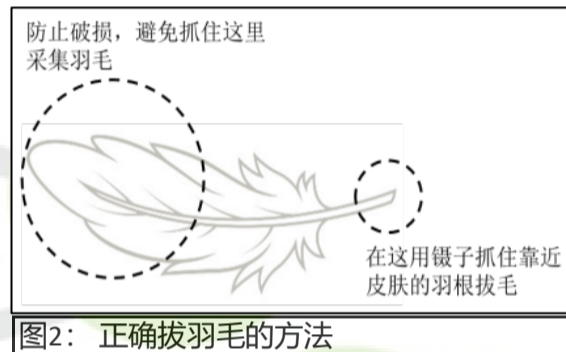


图2: 正确拔羽毛的方法

来自马来西亚或其他国家的顾客:-

APICAL SCIENTIFIC SDN. BHD.
Lot 7-1 to 7-4, Jalan SP 2/7,
Taman Serdang Perdana, Seksyen 2,
43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia
注: Avian PCR Test

来自新加坡的顾客:-

AXIL SCIENTIFIC PTE. LTD.
41 Science Park Road, #04-08 The Gemini,
Singapore Science Park II,
117610 Singapore
注: Avian PCR Test